

LABORATOIRE BIOCHIMIE	Instruction	INS-TC-36-v00
	Transports des spécimens au laboratoire	<i>Date d'application : 19/04/2011</i> <i>Page : 1/1</i>

Tâches	Points clés
1. Vérifier, avant le transport, que les tubes sont correctement bouchés 2. Utiliser des caisses ou paniers de transport fait de matériau léger (éviter les chocs) et le mieux est qu'il soit compartimenté pour empêcher le renversement et le mélange des tubes. 3. Respecter les délais de transport : le contact prolongé du plasma ou sérum, avec les éléments figurés du sang est susceptible d'altérer la concentration des métabolites à doser. 4. Le transport des échantillons de gaz du sang mérite une attention particulière, en raison de la fragilité des constituants qui ne se conservent que 20 minutes à température ambiante et moins de 3 heures à +4°C. 5. Vérifier, à chaque fois et pour chaque paramètres, les conditions optimales d'acheminement et en informer le responsable du transport. 6. Les échantillons biologiques, qui doivent être acheminés par la poste ou par transporteur au laboratoire exécutant l'analyse, doivent être conditionnés selon les exigences suivantes: - le ou les récipients étanches contenant les échantillons biologiques doivent être insérés dans une boîte étanche, tapissée par un matériau absorbant (ex. coton hydrophile), l'ensemble étant alors placé dans un emballage extérieur résistant aux chocs. - l'emballage extérieur doit mentionner les noms et adresses du laboratoire, éventuellement du laboratoire expéditeur.	

Poste	Approbateur
Nom	
Signature	